



**Das weltweit erste kontaktlose Kaltplasmagerät
für große Behandlungsareale.**



Akne

Neurodermitis

Schuppenflechte

Hautausschlag

Besenreiser

Wunden

Warzen

Dr.plajin hilft.





Dr.plajin ist die weltweit erste patentierte Technologie, die große Mengen an Plasmaionen erzeugt. Das kontaklose Hocheistungs-Kaltplasmagerät Dr.plajin ist ideal zur Behandlung großflächiger Areale z.B. bei Akne, Neurodermitis, Schuppenflechte, Hautauschlag, Besenreiser, Warzen und auch Wunden.

In der Physik gilt Plasma neben den drei klassischen Aggregatzuständen der Materie (fest, flüssig, gasförmig) als der nicht klassische bzw. vierte Aggregatzustand der Materie. Jedes beliebige Gas kann durch Energiezufuhr in diesen Zustand überführt werden.

Durch das Hinzufügen von Energie kommt es zur Abtrennung von Ladungsträgern und zur Aufspaltung molekularer Verbindungen. Plasma ist also ein teilweise ionisiertes Gas mit einer Vielzahl von interessanten Eigenschaften.

Dr.plajin erzeugt ein gewebeverträgliches Plasma auf Körpertemperatur-Niveau und eignen sich daher besonders für die lokale Behandlung mikrobiell kontaminierter, besiedelter bzw. infizierter Haut und Wunden.

Dr.plajin bewirkt zudem eine Tiefenstimulation der behandelten Haut- bzw. Wundfläche, die sich in einer nachhaltig gesteigerten Mikrozirkulation widerspiegelt. Die Wunde wird mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und somit wird die Wundheilung aktiviert.

Vorteile

- großflächiges Behandlungsareal
- berührungslos
- fördert die Wundheilung
- antibakterielle und antientzündliche Wirkung
- inaktiviert multiresistente Erreger MRSA
- breites Indikationsspektrum bei akuten und chronischen Wunden
- nicht-invasives, schmerzfreies Verfahren ohne Anästhesie
- punktgenauer Einsatz, auch in Vertiefungen und Kavitäten
- einfache Handhabung
- keine Nebenwirkungen oder Resistenzbildungen bekannt
- Erhöhung der Mikrozirkulation im Gewebe
- Anregung der Wundheilung
- rascher Wirkungseintritt
- sehr gute Verträglichkeit
- Hemmung von Biofilmen
- Senkung des pH-Werts
- keine Resistenzbildung



vorher

nachher



Neurodermitis vorher und nach 4 Wochen täglicher Behandlung à 30 Minuten




Besenreiser vorher und nach 3 Behandlungen à 30 Minuten



Verbrennungen vorher und nach 4 Wochen täglicher Behandlung à 30 Minuten

Dr Plajin. Non-Contact high power Plasma Stimul

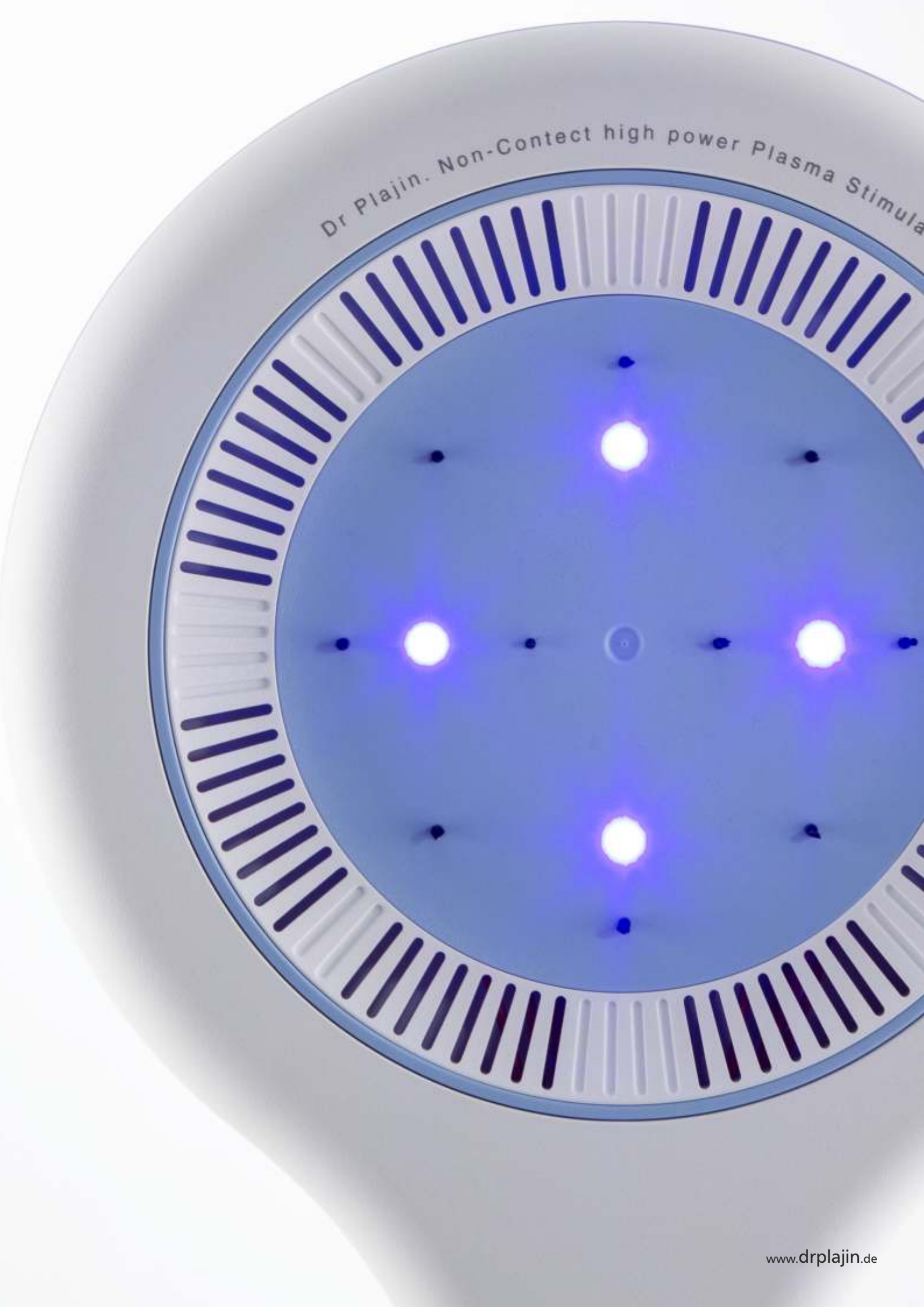



Hautproblemen oder gar -erkrankungen	(33,4 %)	27.621.800
Im Alter zunehmend - ab-60-Jährige:	(47,8 %)	
altersbedingte Faltenbildung und Trockenheit	(16,4 %)	13.562.800
Frauen fühlen sich davon besonders betroffen	(21,7 %)	17.945.900
Hautunreinheiten oder Akne	(7,8 %)	6.450.600
Pigmentflecken	(5,8 %)	4.796.600
Neigung zu Hitzepickeln bzw. "Mallorca-Akne"	(3,1 %)	2.563.700
(Alters-)Warzen	(2,7 %)	2.232.900
Hautausschlag ohne erkennbare Ursache	(2,6 %)	2.150.200
infektiöse Hauterkrankungen wie etwa Herpes	(2,1 %)	1.736.700
Schuppenflechten	(1,9 %)	1.571.300
Neurodermitis	(1,5 %)	1.240.500





2h



1h




Dr. PLAJIN

on / off

10'

Untersuchung zum Gefährdungspotenzial des Produkts „Dr.plajin“ durch:
HAWK Fakultät Naturwissenschaften und Technik . Göttingen
Dr. Andreas Helmke

Auszug:

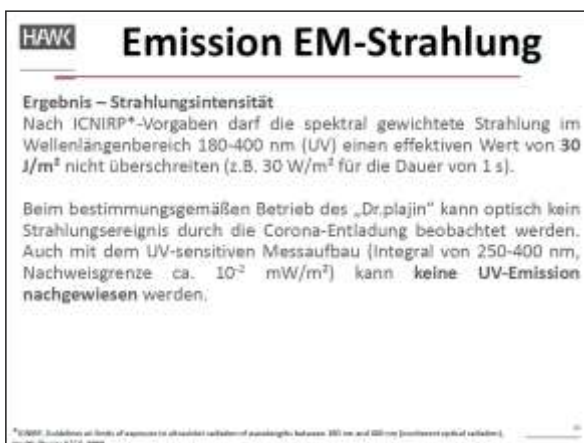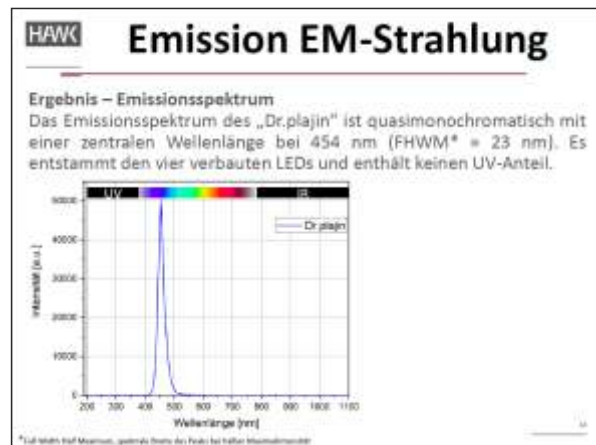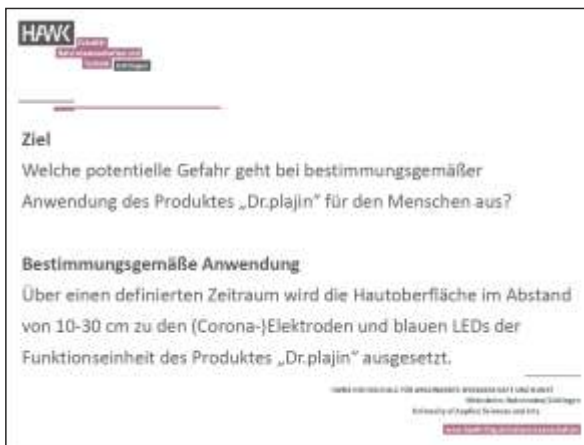


Fazit
Auf Basis der durchgeführten Untersuchungen zu Gefährdungspotentialen durch Stromfluss, Ozon-Emission und UV-Emission konnte keine unmittelbare Gefährdung von Anwender/innen beim bestimmungsgemäßen Einsatz des Produktes „Dr.plajin“ identifiziert werden.

the original
dr.plajin



dr. plajin
the original



Das weltweit erste kontaktlose Kaltplasmagerät für große Behandlungsareale.



Korea Patent



Internationales Patent (PCT) angemeldet



HAWK Fakultät Naturwissenschaften und
Technik in Göttingen

Verantwortlich für die Seiteninhalte:

Plajin Media LIMITED
Gibraltar registered No. 118789
125/4 Main Street
Gibraltar, GX11 1AA
help@drplajin.de
www.drplajin.de

VERTRIEB & SERVICE
EXKLUSIV FÜR EUROPA

PLASINA UG
Blumenstraße 4c
D-38118 Braunschweig
info@plasina.de



